

GEBRAUCHS- UND MONTAGE-ANLEITUNG



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren delficare-Fachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung.



Die aktuellste Bedienungsanleitung kann auch als PDF beim Kundenservice angefordert werden. Hierbei können vergrößerte Formate für sehbehinderte Personen dargestellt werden.
Eine barrierefreie Gebrauchsanweisung in leichter und/oder einfacher Sprache ist seitens des Herstellers nicht lieferbar.

Konformitätserklärung:

Die delficare GmbH erklärt für das beschriebene Produkt die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745

Indikation:

Der **varioporto** Duschklappsitz ist für Personen konzipiert, bei denen folgende Funktionseinschränkungen auftreten:

Standunsicherheit/Stehunfähigkeit bei Gebrauchsminderung/ fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten oder andere, die Standsicherheit beeinträchtigende Erkrankungen (z.B. Kraftverlust bei bösartigen Erkrankungen, chronische, fortgeschrittene Herz/Kreislauf- und Lungenerkrankungen), so dass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch ermöglicht wird.

Kontraindikation:

Achtung: Der **varioporto** Duschklappsitz ist nur zum Sitzen für Personen bis max. 130 kg Körpergewicht geeignet. Er darf nicht verwendet werden bei Personen, die nicht in der Lage sind, ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren. Er darf nicht als Aufstiegshilfe oder zu ähnlichen Zwecken verwendet werden.

Geeignet sind nahezu alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe:

glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe.



Holz



Fliesen



Glas



Granit



Marmor



Stein

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit! Keine Haftung auf PE, PP, PTEE (Teflon), Plexiglas, Polycarbonat. Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe wird keine Haftung übernommen. Zur Erzielung einer optimalen Haftung kann es je nach Untergrund erforderlich sein die Oberfläche mechanisch aufzurauen oder einen Primer/Haftmittler einzusetzen.

Hinweis: Die Montage ist aus Sicherheitsgründen nur durch den autorisierten Fachhandel erlaubt!

Montage


Lieferumfang:

1 x Sitzeinheit 1 x Wandstütze
2 Paar Höhenadapter 1 Paar Stellfüße (montiert)
1 x Reinigungsset (Scheuermilch, Schleifschwamm, delfi-clean, Vliestücher)
1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, Bedienungsanleitung, Schlüssel T2)

Achtung: Der Kleber ist innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum zu verwenden (Siehe MHD-Aufdruck Tubenfalz).

Vor der Montage des Duschklappsitzes Untergrund prüfen:

Bei Fliesenversatz:
Montage mit Dübel und Schrauben!

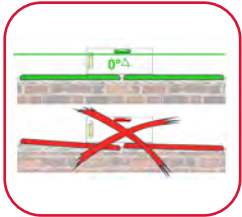

Fixierung der Wandstütze

Schutzfolie an den Klebestreifen auf der Rückseite der Wandstütze abziehen. Nehmen Sie hierzu eine Wasserwaage oder orientieren Sie sich ggf. an den Fliesenfugen. Wandstütze mit der schrägen Seiten oben, mittig am vorgesehenen Platz senkrecht auf den Wannenrand oder den Boden stellen und an die Wand drücken.

Sitzhöhe einstellen

Vor der Montage der Sitzeinheit ist ggf. die Sitzhöhe einzustellen. Die Sitzhöhe ist werkseitig auf 47 cm. eingestellt. Für eine größere Sitzhöhe müssen Höhenadapter (jeweils 2,5 cm) montiert werden. Bei der benötigten Sitzhöhe können Sie sich an anderen Sitzgelegenheiten orientieren, die vom Benutzer normalerweise verwendet werden. Hierzu die Stellfüße herausdrehen und so viele der beigegeführten Höhenadapter an beiden Fußenden einstecken bis die gewünschte Höhe erreicht ist (max. 2 Stück je Seite). Danach die beiden Stellfüße in die Höhenadapter eindrehen, und mit der Kontermutter sichern.

Montage der Sitzeinheit

Reinigung des Untergrundes

Sehr Wichtig! An den vorgesehenen Klebeflächen für das Klebesystem der Sitzeinheit muss der Untergrund mit dem beigegeführten Reinigungsset (Bild) von allen Schmutzpartikeln und Haushaltsreiniger-Rückständen befreit sein! Dadurch erhält der Kleber seine Festigkeit an der Wand.

Nach Reinigung des Untergrundes

Montagehöhe festlegen

Die gesamte Sitzeinheit aufklappen und waagrecht halten. Dann in die gerippte Vertiefung der Wandstütze einführen und sich die Markierung auf der Montagefolie merken. Danach gesamte Sitzeinheit wieder entfernen und **alle Schutzfolien des Klebesystems abziehen.** (Bild)

Jetzt die gesamte Sitzeinheit wiederum in dieselbe gerippte Vertiefung der Wandstütze einführen und im Bereich der Verklebung fest an die Wand andrücken.

Achtung!


Der Fuß muss senkrecht stehen.


Die Sitzfläche darf nicht nach vorne geneigt sein.

Klebefestigkeit testen

Nach 60 Sekunden mit den Händen den Duschklappsitz an den vorderen Eckbereichen festhalten und kräftig abwechselnd nach links und rechts drücken/ziehen.

Hinweis: Wenn sich der Duschklappsitz bei diesem Test von der Wand löst, bedeutet dies, dass sich der Untergrund nicht für eine Verklebung eignet. Die Ursache kann darin liegen, dass der Untergrund nicht ausreichend vorgereinigt wurde. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang und verwenden Sie hierfür ggf. neue Klebesystemeinheiten (Klebeplatten und Klebeadapter) oder unsere Bohradapter (Art. 70100).

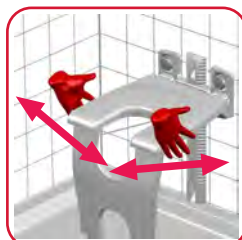

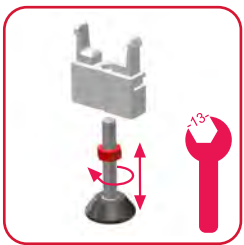

Sitzfläche justieren

Für eine waagrechte Sitzfläche müssen zum Ausgleich des Gefälles der Duschwanne die Stellfüße an den Höhenadaptern angepasst werden.

- Kontermutter lösen (Schlüsselweite 13).
- Durch Herausdrehen der Stellfüße die notwendige Höhe einstellen.
- Kontermutter wieder festdrehen.



Sternschrauben und Torxschrauben herausdrehen


Die jeweils links und rechts der Wandhalterung befindlichen 3 Torxschrauben mit dem mitgelieferten Schlüssel T2 herausdrehen. Ebenso die beiden Sterngriffschrauben.

Jetzt lässt sich die gesamte Sitzeinheit entfernen.

Fliesenfugen ggf. mit der beiliegenden Dichtmasse abdichten.


Klebesystemeinheiten nochmals andrücken.

Kleber einfüllen

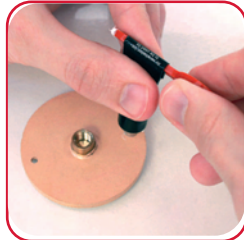

Mit Hilfe des roten Schlüssels die Tubenspitze der Klebetube aufstecken. Tubenende in den roten Schlüssel einfädeln. **Tubenspitze** durch eine kleine Drehung **fest und dicht** in eine der runden Einfüllöffnungen stecken. Tubenende aufrollen und Kleber langsam einfüllen, bis er an der anderen Öffnung sichtbar austritt.

Achtung! Klebeadapter jetzt nicht mehr andrücken, damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen!

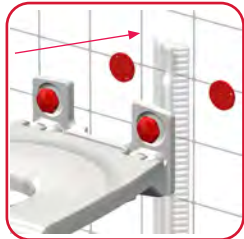

Sitzeinheit befestigen

Die gesamte Sitzeinheit über den beiden Klebesystemeinheiten positionieren und beide Sterngriffschrauben nach rechts eindrehen, anschließend die 6 Torxschrauben.

Kleber aushärten lassen

In den ersten 12 Stunden muss die Sitzeinheit in der **waagrechten, abgestützten** Position verbleiben und die Klebeadapter müssen vor direkter Feuchtigkeit geschützt sein.

Nach 12 Stunden kann die Sitzeinheit nach oben geklappt werden.

Die vollständige Belastung der Sitzeinheit ist nach 24 Stunden möglich.



0 - 24 Stunden



ab 12 Stunden



ab 24 Stunden



Duschklappsitz falten

Zum Zusammenfallen die Sitzeinheit hoch ziehen.

Zum Auseinanderfallen die Sitzeinheit nach vorne ziehen.

Die Fußstütze klappt selbstständig ein und aus.

Demontage der Sitzeinheit

Sterngriffschrauben und Torxschrauben lösen, bis sich die Sitzeinheit entfernen lässt.

Die beiden Klebesystemeinheiten lassen sich mit einer Spachtel entfernen.

Die Klebeadapter am besten mit einer Rohrzange drehend ablösen.



Demontage der Wandstütze

Die Wandstütze von den Fliesen lösen.

Klebereste entfernen

Klebereste mit einem Glasschaber entfernen.

Bei Rückständen in rauen Oberflächen und in Fugen eignet sich ein Siliconentferner oder Aceton.

Benutzung

Sicherheitshinweise

Achtung:

Der Kleber für die Wandbefestigung ist für den Nassbereich geeignet, muß aber regelmäßig abtrocknen können. Achten Sie deshalb - besonders wenn mehrere Personen nacheinander Duschen, und in fensterlosen Badezimmern - für gute Lüftung! (ggf. Badezimmer- und Duschkabinentür offen halten)

Immer ruhig in der Mitte der Sitzeinheit sitzen. Immer gerade auf der Sitzeinheit sitzen.

Beim Hinsetzen und Aufstehen -falls notwendig- eine Betreuungsperson zu Hilfe nehmen.

Beide Stellfüße müssen sicher auf der Duschwanne aufstehen. Beim Falten der Sitzeinheit besteht Klemmgefahr für die Hände, deshalb die Sitzplatte nur von vorne anfassen.

Kipp- und Ausrutschgefahr !

- Für die Montage und Demontage wird keine Haftung von uns übernommen.
- Für die Sicherheit des Benutzers darf dieser Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet und die max. Belastung nicht überschritten werden.
- Bei Montagefehler (z.B. nicht ausreichende Reinigung) oder der Montage auf ungeeigneten Untergründen (z.B. nanobeschichteten Oberflächen) kann eine anfänglich optimale Klebewirkung im Laufe der Zeit nachlassen. Die Klebekraft sollte daher vor jeder Anwendung durch den Benutzer geprüft werden. Dies kann wie unter dem Punkt "Klebefestigkeit testen" erfolgen. Bei der Durchführung der Prüfung ist darauf zu achten, dass die beiden Sternschrauben fest angezogen sind. Sollte sich bei dieser Prüfung herausstellen, dass die Klebewirkung zu Wand nachgelassen hat, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich in diesem Falle an die Firma, die den Duschklappsitz installiert hat.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. In Deutschland ist es das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Berlin, www.bfarm.de

Reinigen/Desinfektion

Nach voller Belastbarkeit des Duschklappsitz können zur Pflege haushaltsübliche Reinigungsmittel verwendet werden (PH-Wert >5). Wisch- oder Sprühdesinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

Wartung / Wiedereinsatz

Der Duschklappsitz ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, den Duschklappsitz bitte an Ihren Fachhandel übergeben. Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.


Lebensdauer

Nach ISO 17966 § 16.3 ist im Homecare-Bereich von einer 2-maligen Benutzung täglich auszugehen. Auf dieser Grundlage wurde der varioparto auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

Technische Daten

Art.Nr.:	Breite:	Tiefe:	Sitztiefe:	Sitzhöhe:	Gewicht:	Max. Belastung:
70000	400 mm	440 mm	385 mm	450 - 525 mm	3,0 kg	130 kg
Materialien:	Polypropylen GF30, Edelstahl				Verarbeitungstemperatur: 15 - 25 °C	

Typenschild:

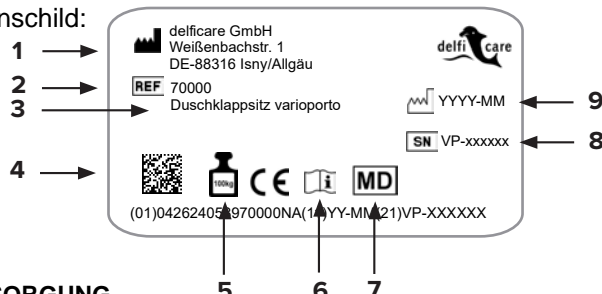

- 1 Hersteller | 2 Artikelnummer | 3 Artikelbezeichnung |
4 UDI-Code | 5 Max. Belastung | 6 Gebrauchsanweisung beachten |
7 Medizinprodukt | 8 Seriennummer | 9 Produktionsdatum (Jahr-Monat).

ENTSORGUNG

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwertung zugeführt. Kunststoffteile werden der Werkstoffwiederverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer, unrichtiger Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung / Instandsetzung ergeben. Änderungen bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikation bleiben vorbehalten.



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24
e-mail: info@delficare.de
Web: www.delficare.de