

variopresa

Gebrauchsanweisung
variopresa Schwenkstützgriff

Artikelnummern:
68650, 68800

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	3
1.1	Allgemeines.....	3
1.2	Konformitätserklärung	3
1.3	Zweckbestimmung	3
1.4	Indikationen	3
1.5	Kontraindikationen	3
1.6	Kontaktinformationen.....	4
1.7	Gewährleistung.....	4
1.8	Haftung.....	4
2	Sicherheitshinweise.....	5
3	Produktbeschreibung	6
3.1	Lieferumfang	6
3.2	Exemplarische Darstellung	6
3.3	Technische Daten	6
3.3.1	Technische Daten	6
3.3.2	Lebensdauer	7
3.3.3	Produktkennzeichnung	7
4	Produkt in Betrieb nehmen	8
4.1	Geeignete Untergründe für die Montage.....	8
4.2	Vorbereitung der Montage.....	8
4.3	Montage	9
5	Reinigung, Wartung/Wiedereinsatz und Entsorgung	14
5.1	Reinigung und Desinfektion	14
5.2	Wartung/Wiedereinsatz.....	14
5.3	Entsorgung	14
6	Produkt außer Betrieb nehmen.....	15

1 Wichtige Informationen

1.1 Allgemeines

Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Beschreibungen für die richtige Montage, Bedienung und Pflege.

Die Gebrauchsanweisung muss dem Benutzer bereitgestellt werden und muss auch bei Weitergabe/Wiedereinsatz des Produkts beim Produkt bleiben.

Die Gebrauchsanweisung muss vor der Inbetriebnahme und Benutzung des Produkts sorgfältig gelesen und vollständig beachtet werden.

Bei Fragen oder Informationsbedarf an den delficare-Fachhändler wenden, der das Produkt geliefert hat.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.

Die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung kann als PDF beim Kundenservice der delficare GmbH angefordert werden. Dabei sind vergrößerte Formate zur Darstellung für sehbehinderte Personen möglich. Eine barrierefreie Gebrauchsanweisung ist seitens der delficare GmbH nicht lieferbar.

1.2 Konformitätserklärung

Für das beschriebene Produkt erklärt die delficare GmbH die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 (MDR).

1.3 Zweckbestimmung

Sicherheitsgriffe und Aufrichthilfen kommen in verschiedenen Ausführungen für Personen in Betracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Körperpflege in der Badewanne oder unter der Dusche ohne weitere Anwendung von Hilfsmitteln nicht mehr erlauben. Sie sind dann indiziert, wenn die Standsicherheit und/oder die Muskelfunktion der unteren Extremitäten eingeschränkt ist. Das gilt auch für Griffe, die im Bereich der Toilette oder des Waschbeckens angebracht werden.

1.4 Indikationen

Der variopresa Schwenkstützgriff ist für Personen konzipiert, die durch Funktionsbeeinträchtigungen der unteren Extremitäten beim selbstständigen Hinsetzen und Aufstehen bei der Toilettenbenutzung eine sichere und stabile Abstützung ihres Körpergewichts (max. 130 kg) benötigen. Durch das Doppel-Klebesystem ist der Schwenkstützgriff besonders sicher.

1.5 Kontraindikationen

Der variopresa Schwenkstützgriff darf nicht von Personen verwendet werden, die sich nicht aus eigener Kraft hinsetzen und aufstehen können.

Der Schwenkstützgriff ist nicht für Rollstuhlfahrer zum seitlichen Übersetzen geeignet.

1.6 Kontaktinformationen

Hersteller	delficare GmbH
Anschrift	Weißbachstrasse 1 88316 Isny/Allgäu
Telefon	+49 (0) 75 62 / 91 25 11
Telefax	+49 (0) 75 62 / 91 25 24
E-Mail	info@delficare.de
Internet	www.delficare.de

1.7 Gewährleistung

Die Laufzeit der Garantie beträgt zwei Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge von übermäßiger Beanspruchung, unsachgemäßer Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben.

Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe übernimmt die delficare GmbH keine Haftung.

Änderungen am Produkt aufgrund technischer Verbesserungen und Designmodifikationen bleiben vorbehalten.

1.8 Haftung

Die delficare GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegeben Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Es wird erwartet, die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen.

Generell darf nur Originalzubehör der delficare GmbH verwendet werden. Wenn Fremdprodukte an dem Produkt montiert werden, dann geht die Verantwortung für die Sicherheit des Produktes an denjenigen über, der das Zubehör montiert bzw. den An-/ Umbau vornimmt. Die Konformität der Kombination aus Zubehör oder Anbau und Produkt ist dann neu durch denjenigen, der an bzw. umbaut, zu erklären. Die von der delficare GmbH nach MDR 2017/745, Anhang II, erklärte Konformität erlischt.

Für die Montage und Demontage übernimmt die delficare GmbH keine Haftung.

2 Sicherheitshinweise

Achtung: Der Kleber für die Wandbefestigung ist für den Nassbereich geeignet, muss aber regelmäßig abtrocknen können. Eine gute Lüftung ist wichtig, insbesondere in fensterlosen Badezimmern und wenn mehrere Personen nacheinander duschen. Zur Lüftung empfiehlt es sich, die Tür des Badezimmers und der Duschkabine offen zu halten.

Nach der Montage und vor jeder Benutzung muss aus sicherem Stand an dem Schwenkstützgriff gerüttelt werden, um die Klebewirkung zu prüfen. Wenn bei der Prüfung eine nachlassende Klebewirkung festgestellt wird, darf der Schwenkstützgriff nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall die Firma kontaktieren, die den Schwenkstützgriff installiert hat.

Beim Anbringen des Schwenkstützgriffs die Anbauhöhe gemäß DIN 18040 beachten.

Der Schwenkstützgriff ist nicht für Rollstuhlfahrer zum seitlichen Übersetzen geeignet.

- Nur der autorisierte Fachhandel darf die Montage aus Sicherheitsgründen durchführen
- Um die Klebeverbindung nicht chemisch anzugreifen und die Haftkraft dauerhaft zu garantieren, keine aggressiven oder stark sauren Reinigungsmittel (z. B. starke Kalkreiniger, Sanitärgrundreiniger oder säurehaltige Reiniger) bei der Reinigung verwenden
- Für die Sicherheit des Benutzers den Artikel nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwenden (nicht missbräuchlich) und die maximale Belastung von 130 kg nicht überschreiten
- Bei Montagefehlern (z. B. unzureichende Reinigung) oder der Montage auf ungeeigneten Untergründen (z. B. nanobeschichtete Oberflächen) kann die anfänglich optimale Klebewirkung mit der Zeit nachlassen. Daher müssen Benutzer die Klebekraft vor jeder Anwendung prüfen. Bei der Prüfung ist darauf zu achten, dass die beiden Sternschrauben fest angezogen sind. Wenn sich bei dieser Prüfung herausstellt, dass die Klebewirkung nachgelassen hat, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall an die Firma wenden, die das Produkt installiert hat
- Bei jedem schwerwiegenden Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, kontaktiert werden. In Deutschland ist es das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Berlin: www.bfarm.de

3 Produktbeschreibung

Der variopresa Schwenkstützgriff ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 gem. MDR Anhang VIII.

3.1 Lieferumfang

- 1 x Stützklappgriff
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, delfi-clean Haftreiniger, Vliestücher, Sanitärscheuermilch)
- 1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, Torxschlüssel Gr. 25)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Hinweis: Den Kleber innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum verwenden, um eine ordnungsgemäße Klebewirkung zu gewährleisten (siehe MHD am Tubenfalz).

3.2 Exemplarische Darstellung

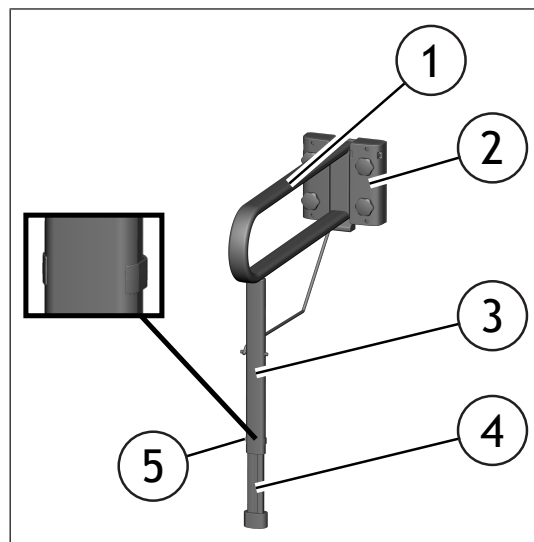


Abb. 1: variopresa Schwenkstützgriff (exemplarisch)

1	Schwenkstützgriff (klappbar)	2	Grundplatte mit Sterngriffschrauben, kleinen Schrauben und Klebeadapter
3	Stützfuß	4	Innenrohr
5	Klammer		

3.3 Technische Daten

3.3.1 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Länge gesamt (Artikelnummer: 68650 / 68800)	78 cm / 92 cm
Länge Griffrohr (Artikelnummer: 68650 / 68800)	65 cm / 80 cm
Durchmesser Griffrohr (B x H)	5 cm x 2,5 cm

Bezeichnung	Wert
Höheneinstellung	70 cm – 85 cm
Maß Grundplatte	20 cm x 25 cm
Gewicht (Artikelnummer: 68650 / 68800)	2,7 kg / 2,9 kg
Max. Belastung	130 kg
Temperatur der Oberfläche/ Verarbeitungstemperatur	5 °C – 25 °C
Lebensdauer	10 Jahre
Material	Aluminium/Kunststoff
Artikelnummer	68650, 68800
Bezeichnung	variopresa Schwenkstützgriff

Tab. 1: Technische Daten

3.3.2 Lebensdauer

Die ISO 17966 § 16.3 legt für den Homecare-Bereich eine zweimalige Benutzung pro Tag fest. Auf dieser Grundlage wurde der variopresa Schwenkstützgriff auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

3.3.3 Produktkennzeichnung

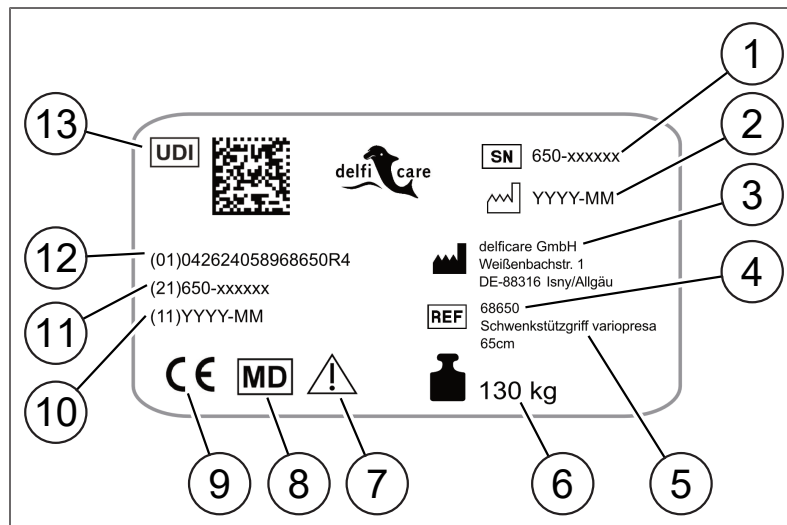


Abb. 2: Typenschild (exemplarisch)

1	Seriennummer	2	Produktionsdatum (Jahr-Monat)
3	Hersteller	4	Artikelnummer
5	Artikelbezeichnung	6	Max. Belastung
7	Informationsbeilage beachten	8	Medizinprodukt
9	CE-Zertifizierung	10	Produktionsdatum (Jahr-Monat)
11	Seriennummer	12	Device Identifier
13	UDI-Code		


4 Produkt in Betrieb nehmen

4.1 Geeignete Untergründe für die Montage

Geeignete Untergründe Für eine optimale Haftung kann es je nach Untergrund notwendig sein, die Oberfläche mechanisch anzurauen oder einen Primer/Haftmittler zu verwenden.

Für den variopresa Schwenkstützgriff sind die folgenden soliden, planen (kein Fliesenversatz) und tragfähigen Untergründe geeignet:

- Glatte oder raue Fliesen
- Steine
- Glas
- Beton
- Metall
- Holz

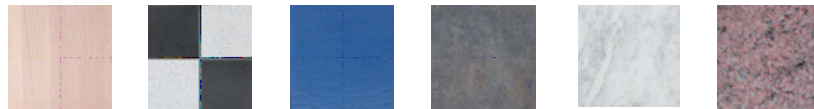

Holz

Fliesen

Glas

Granit

Marmor

Stein

Ungeeignete Untergründe Für den variopresa Schwenkstützgriff sind folgende Untergründe nicht geeignet:

- Loser Putz
- Tapeten
- Textile Untergründe
- Kunststoffe (z. B. PE, PP, PTEE)
- Plexiglas
- Polycarbonat

4.2 Vorbereitung der Montage





Der folgende QR-Code führt zu einem Video, das als zusätzliche Quelle für die Gebrauchsanweisung zur Prüfung des Untergrunds und zur Vorbereitung der Montage dient:



Untergrund auf Hohlklang prüfen

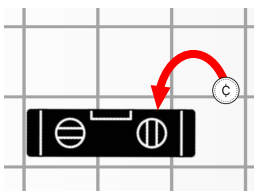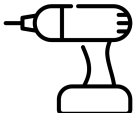


1. Den Untergrund durch Abklopfen mit dem Finger auf Hohlklang prüfen.
Bei Hohlklang Schritt 3 beachten.

<p>Untergrund auf Fliesenversatz prüfen</p>		<p>2. Den Untergrund mit der Wasserwaage auf Fliesenversatz prüfen. Dazu mit einer Cent-Münze prüfen, ob sich die Cent-Münze in den entstandenen Spalt einführen lässt. Lässt sich die Cent-Münze einführen, ist der Fliesenversatz zu groß. Bei Fliesenversatz Schritt 3 beachten.</p>
<p>Befestigung mit Dübeln und Schrauben bei ungeeignetem Untergrund</p>		<p>3. Bei Hohlklang und zu großem Fliesenversatz: Den Haltegriff mit Dübel und Schrauben befestigen. Dabei den Bohradapter von der delficare GmbH gemäß der beiliegenden Montageanleitung verwenden.</p>
<p>Luftfeuchtigkeit prüfen</p>		<p>4. Die Luftfeuchtigkeit im Bad prüfen. Wenn zuvor eine Person geduscht hat oder sich ein Feuchtigkeitfilm auf den Fliesen befindet, den Raum lüften, bis die Fliesen trocken sind.</p>
<p>Temperatur prüfen</p>		<p>5. Die Temperatur der zu beklebenden Oberfläche prüfen, um eine optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 15 °C –30 °C zu gewährleisten. Bei Bedarf die beklebende Oberfläche mit einem Föhn erwärmen. ⇒ Die Vorbereitung der Montage ist abgeschlossen.</p>






4.3 Montage

Der folgende QR-Code führt zu einem Video, das als zusätzliche Quelle für die Gebrauchsanweisung dient:

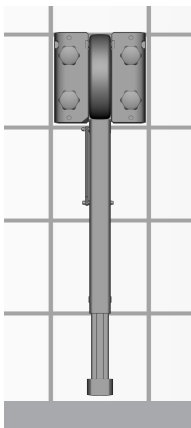


<p>Höhe des Stützfuß einstellen</p>		<p>1. Den Schwenkstützgriff vollständig ausklappen und an der vorgesehenen Stelle positionieren, um die benötigte Montagehöhe herauszufinden.</p>
--	---	---


Klebestellen markieren und Fliesen reinigen

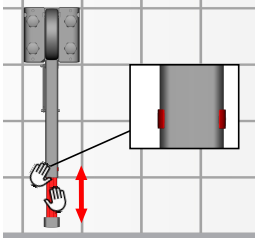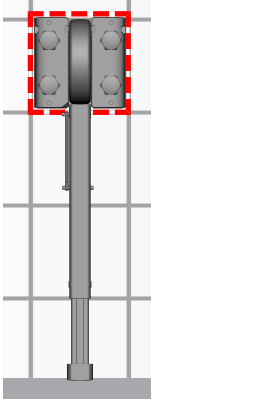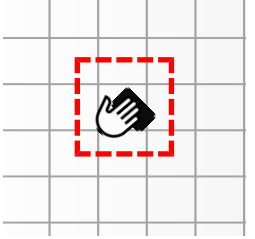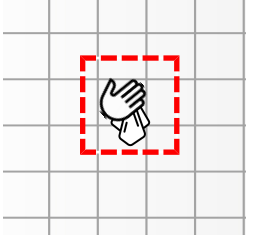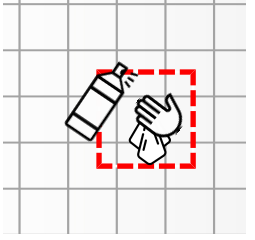	<p>2. Den Stützfuß an die benötigte Montagehöhe anpassen und darauf achten, dass er Bodenkontakt hat. Dabei das Innenrohr in die benötigte Position schieben und mit der Klammer fixieren.</p>
	<p>3. Den Schwenkstützgriff an der vorgesehenen Stelle positionieren und die Klebestellen des Schwenkstützgriff markieren. Dabei an den Fliesenfugen orientieren oder eine Wasserwaage verwenden. Der Stützfuß steht währenddessen auf dem Boden.</p>
	<p>4. Die vorgesehenen Klebestellen mit dem Schleifschwamm und der Sanitarscheuermilch reinigen, damit die Klebestellen fett- und schmutzfrei sind.</p>
	<p>5. Die vorgesehenen Klebestellen mit dem mitgelieferten Vliestuch reinigen, um alle Rückstände der Sanitarscheuermilch zu entfernen.</p>
	<p>6. Den delfi-clean Haftreiniger großzügig auf die vorgesehenen Klebestellen aufsprühen und sofort mit einem frischen Tuch abwischen. Diesen Vorgang mindestens zweimal wiederholen, um alle Rückstände zu entfernen.</p>

**Schwenkstützgriff
befestigen**

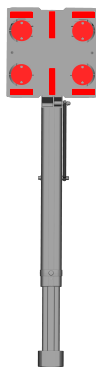


7. Die Schutzfolie von der Rückseite der runden Klebeadapter und der Grundplatten abziehen.

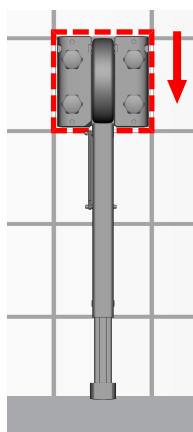


8. Den Schwenkstützgriff an den gereinigten und markierten Klebestellen fixieren. Dabei an der oberen Klebestelle ansetzen und den Schwenkstützgriff von oben nach unten an die Wand drücken. Anschließend den gesamten Schwenkstützgriff fest an die Wand drücken.

**Schwenkstützgriff
entfernen**

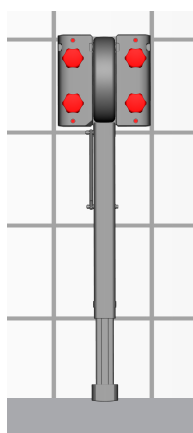



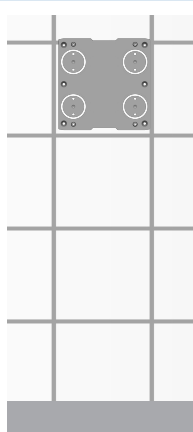


9. Die Sterngriffschrauben sowie die vier kleinen Schrauben mit dem mitgelieferten Torxschlüssel von der Grundplatte lösen und den Stützgriff von der Wand entfernen.







10. Die Grundplatte mit den runden Klebeadaptern fest an die Wand drücken.
Falls die runden Klebeadapter auf einer Fliesenfuge liegen: Die Fliesenfuge mit der beigelegten Dichtmasse schließen, um den Austritt des Klebstoffs zu verhindern.

Klebstoff einfüllen

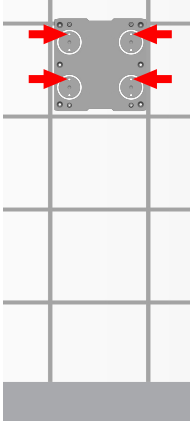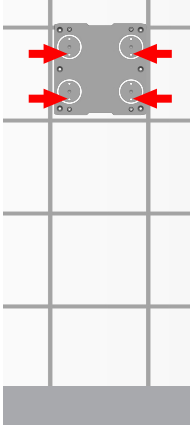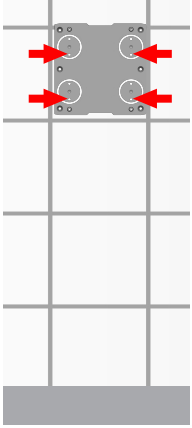	<p>11. Mit dem mitgelieferten roten Schlüssel die Spitze der Klebetube aufstechen.</p>
	<p>12. Das Ende der Klebetube um eine Falz entfalten, den roten Schlüssel einfädeln und um eine Falz aufrollen.</p>
	<p>13. Die Spitze der Klebetube fest und dicht in die große Öffnung durch eine Drehbewegung in den Klebeadapter stecken.</p>
	<p>14. Das Ende der Klebetube mit dem roten Schlüssel langsam aufrollen, damit der Klebstoff gleichmäßig in den Klebeadapter fließt.</p>
	<p>15. Das Aufrollen des Klebstoffs beenden, sobald der Klebstoff an der kleinen Öffnung austritt. Den Klebeadapter nicht an die Wand drücken, sodass keine Hohlräume zwischen der Wand und dem Klebeadapter entstehen.</p>

Schwenkstützgriff fixieren

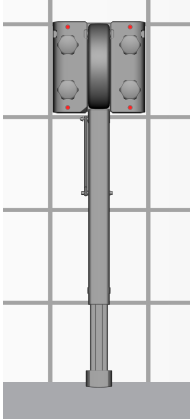	<p>16. Den Schwenkstützgriff auf die Grundplatte positionieren und mit den vier kleinen Schrauben ohne andrücken festschrauben.</p>
---	--

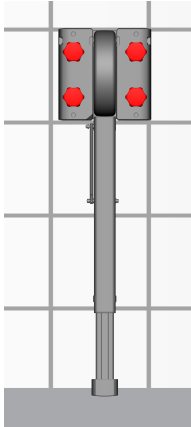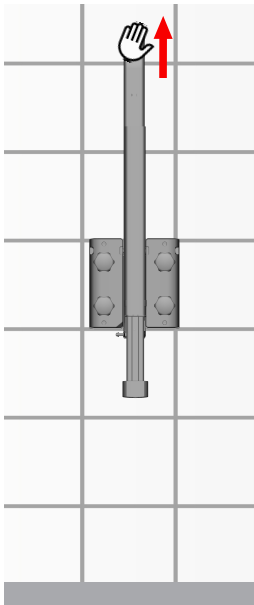	<p>17. Die Sterngriffschrauben ohne andrücken an die Klebeadapter befestigen.</p>
	<p>18. Den Schwenkstützgriff ohne andrücken nach oben klappen.</p>
<p>Kleber aushärten lassen</p>	<div data-bbox="550 1305 794 1563" data-label="Image">  </div> <p>19. Den Klebstoff 24 Stunden aushärten lassen und den Schwenkstützgriff nicht belasten. ⇒ Der Schwenkstützgriff ist montiert.</p>

5 Reinigung, Wartung/Wiedereinsatz und Entsorgung

5.1 Reinigung und Desinfektion

Reinigung

Der Schwenkstützgriff kann 24 Stunden nach der Montage mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (z. B. ein Mikrofasertuch mit wenigen Tropfen Spülmittel) gereinigt werden. Für die Reinigung keine aggressiven oder stark sauren Reinigungsmittel (z. B. starke Kalkreiniger, Sanitärgrundreiniger oder säurehaltige Reiniger), um die Klebeverbindung nicht chemisch anzugreifen und die Haftkraft dauerhaft zu garantieren.

Desinfektion

Der Schwenkstützgriff lässt sich mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln (Wisch- oder Sprühdesinfektion) reinigen.

5.2 Wartung/Wiedereinsatz

Der Schwenkstützgriff ist wartungsfrei.

Bei einer notwendigen Instandsetzung den Schwenkstützgriff an den Fachhandel übergeben und den Schwenkstützgriff nicht weiter verwenden.

Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.


5.3 Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Dabei müssen die Geräteverpackung und die Kunststoffteile der Wertstoffwiederverwertung zugeführt werden.


Nähere Informationen zu örtlichen Entsorgungsunternehmen können bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung eingeholt werden.

6 Produkt außer Betrieb nehmen

Produkt und Grundplatte von der Wand lösen

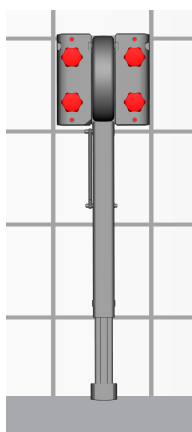


1. Die Sterngriffschrauben und die vier kleinen Schrauben mit dem mitgelieferten Torxschlüssel von der Grundplatte lösen und den Stützgriff von der Wand entfernen.

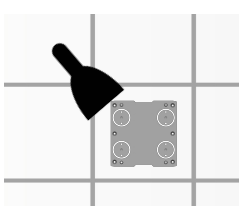


2. Die Grundplatte mit einer Spachtel von der Wand lösen.

Klebeadapter entfernen

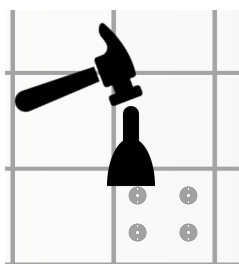

3. Mit einer Spachtel und einem Hammer an die Klebeadapter ansetzen, vorsichtig ringsherum klopfen und von der Wand lösen.

Klebereste entfernen

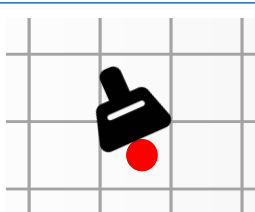

4. Eventuell vorhandene Klebereste mit einem Glaschaber entfernen. Bei rauen Oberflächen oder Fugen einen Silikonentferner oder Aceton verwenden.
⇒ Der Klebeadapter und die Klebereste sind entfernt.

Kleben statt Bohren

